


Manual para el Kit de Uso Personal

Lea todas las instrucciones del manual cuidadosamente antes de la colección de la muestra. Los resultados de la prueba pueden ser inválidos si la prueba no se hace correctamente.

Depósito de la Muestra

1. Ponga el papel de colección proporcionado dentro del inodoro y por encima del agua.
2. Deposite la muestra de heces arriba del papel de colección.
3. Coleccione la muestra de las heces antes de que el papel se hunda y la muestra de heces toque el agua.
4. Baje el inodoro. El papel de colección es biodegradable y no dañará los sistemas sépticos.

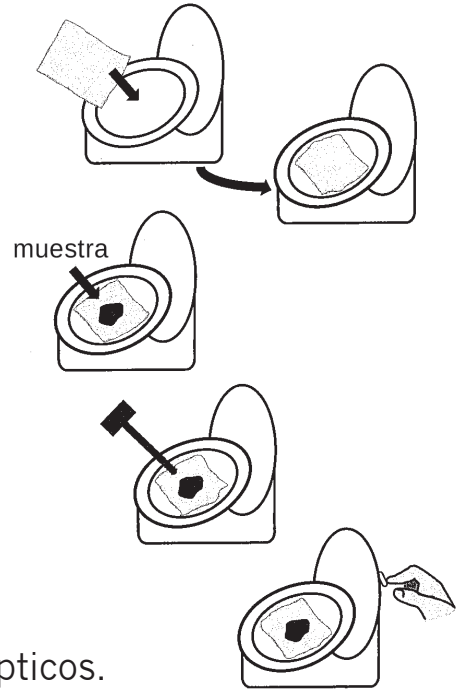

Colección de la Muestra

1. Complete toda la información requerida en la botella de muestra.



Abra la tapa verde dando vuelta y levantando.



2. Raspe la superficie de la muestra de heces con la sonda de muestra.



Cubra la porción con ranuras de la sonda completamente con la muestra de heces.



3. Cierre la botella de muestra insertando la sonda de muestra y ajuste la tapa verde firmemente. No vuelva a abrir la botella.



Mande la botella de muestra a Bio-Reference Laboratories, inc. en el sobre incluido.

